



Kedves Túlélő,

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket, és bármennyire is furcsán hangzik, bízunk benne, hogy igazán sosem lesz szüksége rá éles helyzetben. Ennek ellenére reméljük hasznosnak találja ezt a különleges eszközt a felkészüléshez, valamint segítségére lesz táborozáskor, utazáskor is. Ötleteket merít, technikákat sajátít el, hogy ne legyen gondja a váratlan helyzetekben.

Használja felelősséggel és tartsa mindig könnyen hozzáférhető helyen, menetkész állapotban!

További termékekért információért látogasson el a www.moose.hu weboldalra!

Kérdéseire szívesen válaszolunk. **FELKÉSZÜLT?**

Üdvözlettel: a MOOSE csapata

MOOSE ELSŐSEGÉLY KÉSZLET

Ez a pehelykönnyű kis készlet mindig rendelkezésre áll a kisebb sérülések ellátásához, melyek kezelés nélkül rövidtávon nemcsak kellemetlenek, de hosszútávon akár el is fertőződhetnek. Helye van az autóban is a szabvány elsősegély doboz mellett, a garázsban vagy a konyhában is.

A CSOMAG TARTALMA

- 15-15 db sebtapasz 2 méretben
 - 2 db nagyobb sebtapasz
 - Gézlapok, pólya és ragtapasz
 - Sebfertőtlenítéshez és tisztításhoz alkoholos törlőkendő
 - Jódos tisztítópálca a mélyebben ülő szennyeződések eltávolításához
 - Vinil kesztyű (L-es méret) ellátáshoz a vér izolálásához
- Tok + egy kisméretű karabiner és visszazárható műanyag tasak egészíti ki a készletet.

A TERMÉK HASZNÁLATA

Először nyugtassa meg a sérültet, ültesse vagy fektesse le úgy, hogy hozzáférjen a sebhöz, húzzon kesztyűt hogy bőre ne érintkezzen a sérült vérével!

1. Ha szennyeződés van a sebben, először mossa le tiszta vízzel, ehhez használhatja a mellékelt tisztítópalcákat és a gézlapokat, majd törölje szárazra vagy szárítsa meg.
2. Várja meg míg az esetleges vérzés alábbhagy vagy megszűnik.
3. A felületi sérülések környékét törölje le az alkoholos kendővel vagy fetőtlenítse jóddal. Ehhez jódos pálcikán található vonal mentén törje meg a pálcát, így a szárbán lévő folyadék kifolyhat és átitatja a vattát.
4. Válasszon ki egy sebtapaszt, mely gézes felülete le tudja fedni a sérülést. Bontsa ki és húzza le a ragasztós rész védőfóliáját és helyezze rá a sebtapaszt a sérülésre. Óvatosan nyomkodja le a tapasz széleit. A helyesen felhelyezett tapasz védi a sebet a további szennyeződésektől, és korlátozottan a nedvességtől is. Kerülje a seb felszakadását.
5. Átvérzés esetén cseréljen kötést. Nagyobb sérülések esetén használja a gézlapokat és a pólyát!

Amint lehet mutassa meg a sérülést orvosnak.

Figyelem: a termékkel nem váltható ki a KÖHÉM rendelet szerinti elsősegély felszerelések!



MOOSE ELSŐSEGÉLY KÉSZLET

A termék magyar nyelvű leírása és használata

MHU-M-50



MOOSE WEBSHOP

Vészhelyzeti és túlélőcsomagok
Ügyfélszolgálat: +36 70 534 08 47
www.moose.hu • info@moose.hu
Kövessen minket a közösségi oldalakon!
Segítünk az egyedi felszerelések összeállításában is!



* részletek a weboldalon.